



Système de tracking avec QR CODE et numéro unique

FM Ref Number: 1501-0440-DC7

## MÉDECIN

Professeur. nom\_1 prenom\_1  
adresse\_1 -  
49033 ANGERS CEDEX CEDEX 9 - France

## LABORATOIRE

NOM\_1  
adresse1\_1 -  
. LUXEMBOURG CEDEX - France

## PATIENT

Nom DEMO  
Prénom FM\_Virus  
Date de naissance 01/01/1960  
Genre Masculin

## BIOMARQUEURS

Date de prélèvement: 08/01/2015


Taux Prothrombine	98 %	ASAT	32 UI/L
Acide Hyaluronique	15 µg/L	ALAT	28 UI/L
Plaquettes	232 G/L	Urée	4,5 mmol/L
A2M	2,30 g/L	GGT	20 UI/L
Bilirubine	10,2 µmol/L		

Résultats de L'ANALYSE SANGUINE


RÉSULTATS: SCORES & CLASSIFICATION pour la fibrose, la cirrhose & l'activité inflammatoire

## RÉSULTATS

	Score	Classification <sup>1</sup>
<b>FibroMètre</b> <i>Score de fibrose</i>	<b>0,40</b>	<b>F1[F1-F2]</b> <i>Prédominance de F1 mais F2 possible</i>
<b>CirrhoMètre</b> <i>Score de cirrhose</i>	<b>0,02</b>	
<b>InflaMètre</b> <i>Score d'activité</i>	<b>0,28</b>	<b>A1/A2</b> <i>Probabilité égale entre A1 et A2</i>

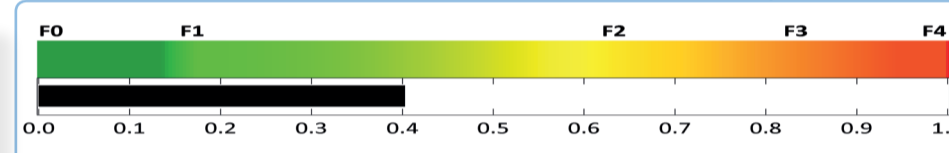

Le graphique CirrhoMètre ainsi que sa classification n'ont pas été affichés car le FibroMeter est le plus approprié pour ce patient.

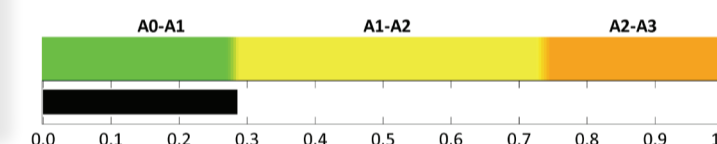

Résultats illustrés sous forme de BARGRAPHS pour une meilleure visibilité

## INFORMATIONS D'INTERPRETATION

Le package FibroMeter<sup>™</sup> Virus évalue le stade de fibrose et de cirrhose du foie. Il a spécifiquement été conçu pour les patients atteints d'hépatite chronique virale avec ou sans co-infection VIH et les porteurs actifs du virus de l'hépatite B. Un algorithme breveté analyse et compare les résultats de 7 marqueurs sanguins combinés aux données patient (âge, genre) pour donner un score de fibrose ou de cirrhose (entre 0 et 1) et son équivalence en stade METAVIR<sup>1</sup>. Il fournit également un score d'activité nécro-inflammatoire accompagné du grade METAVIR associé. Le SYSTEME EXPERT analyse la cohérence de l'ensemble des paramètres sanguins et détecte automatiquement les marqueurs présentant un risque de faux positif. Il évalue ensuite l'impact de ces marqueurs sur le résultat et ajuste les scores si nécessaire.

Les résultats doivent être interprétés en fonction du contexte clinique du patient, particulièrement lorsque le système expert a ajusté les scores.

<sup>1</sup>Le Score METAVIR est un système de notation histologique utilisé pour déterminer la nature et l'étendue de la fibrose hépatique et de l'inflammation.

F0 = pas de fibrose  
F1 = fibrose portale sans septa  
F2 = fibrose portale avec quelques septa  
F3 = nombreux septa sans cirrhose  
F4 = cirrhose

A0 = aucune activité  
A1 = activité légère  
A2 = activité modérée  
A3 = activité sévère

Informations nécessaires à l'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MISES EN GARDE

Les circonstances suivantes sont susceptibles d'impacter le résultat et/ou l'interprétation des tests FibroMeter<sup>™</sup> V:

- Age : patient de moins de 18 ans
- Grossesse
- Hépatite aiguë
- Autre maladie chronique isolée ou associée au foie
- Patients sous traitement interférant (anti-viral, anti-fibrosant, anti-coagulant par AVK)
- Affections sévères ou chroniques non liées au foie entraînant un syndrome inflammatoire tel que l'arthrite
- Insuffisance d'autre organe que le foie, en particulier l'insuffisance rénale
- Toute cause susceptible de faire varier un marqueur en dehors de l'hépatopathie, exemples : pathologie aiguë, injection d'acide hyaluronique...

PRÉCAUTIONS D'USAGE & AVERTISSEMENTS pour une utilisation optimale du test

Echosens  
30 Place d'Italie  
75013 Paris - France

www.fibrometer.com  
Date de traitement: 15/01/2015

